

BRUGSANVISNING

200 KG'S BADEBÆNK (MED TELESKOPBEN)

HØJDEN JUSTERES PÅ FØLGENDE MÅDE:



1. BADEBÆNKEN LÆGGES NED.
2. CLIPSEN TAGES UD SAMTIDIG MED, AT DER HOLDES I TELESKOPBENET.
3. TELESKOPBENET FLYTTES TIL DEN ØNSKEDE POSITION (UD AF 3 INDSTILLINGSMULIGHEDER).
4. CLIPSEN TRYKES I BUND.
DET SAMME GENTAGES FOR DE ØVRIGE 3 BEN.

VED SKRÅSTILLING (VINKLING) AF SÆDET.

BENENE INDSTILLES SOM OVENFOR BESKREVET.

DE FORRESTE BEN INDSTILLES I EN ELLER TO POSITIONER LAVERE END DE BAGERSTE. VED DE BAGERSTE BEN I ØVERSTE POSITION OG DE FORRESTE I LAVESTE ER VINKLEN 7°. VED DE BAGERSTE BEN I MELLEM POSITION OG DE FORRESTE I LAVESTE ER VINKLEN 3,5°.

200 KG'S BADEBÆNKE RYG



1. BADEBÆNKEN VENDES PÅ HOVEDET.
2. DE TO FORHØJER RØR SKRUES FAST MED DE 6 LANGE SKRUER OG VED HJÆLP AF EN STJERNE SKRUETRÆKKER. (Se billede til højre)
3. NU SÆTTES RYGGEN PÅ MED FINGERSKRUERNE OG DE SORTE AFSTANDSTYKKER. (Se billede til venstre)



Varenr.:	RESERVEDELE::		
310065	Clips til højdeindstilling, grå	310172	Teleskopben (m/clips,dupsko,bøsning) 1 stk.

<p>Artkl. Nr. 310145 Max. belastning 200 kg NB! clipsen skal skubbes i bund ved højdeindstilling</p> <p>2 års reklamationsret mod fabriktionsfejl (og rust reklamationsret).</p>		<p>Rengøring: Produktet kan rengøres med almindelige rengøringsmidler uden slibemiddel. Efter rengøringen skal produktet skylles og aftørres. Produktet kan tåle rengøring op til 85° C i 3 minutter.</p> <p>..</p> <p>CE</p> <p>Produktet er CE-mærket hvilket betyder, at produktet overholder EU-lovgivningen og muliggør varens fri bevægelighed på det europæiske marked.</p> <p>04.09.15</p>	
310165	Clips til højdeindstilling, magentafarvet	800002	Specielle popnitter
310170	Midterlameller	800219	Komplet sæt sæde til 200 kg badebænk (lameller+popnitter)
310171	Yderlameller	800366	Skive til dupsko, badebænk 200/300kg

HMN a/s

Midtager 22, 2605 Brøndby, Danmark
Tlf.: +45 43 96 24 00 Fax. +45 43 96 26 92

E-mail info@hmn.dk
www.hmn.dk