


BRUGSANVISNING FRITSTÅENDE TOILETFORHØJER MODEL FRIGG

Stol beregnet til at side på ved toiletbesøg


HØJDEN JUSTERES PÅ FØLGENDE MÅDE:

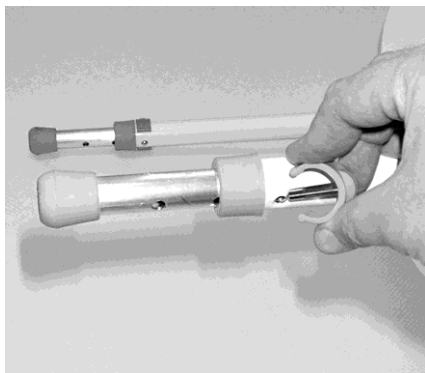

- 1) FORHØJEREN LÆGGES PÅ SIDEN.
- 2) CLIPSEN TAGES UD
- 3) BENET FLYTTES TIL DEN ØNSKEDE HØJDE
- 4) CLIPSEN SÆTTES I IGEN (NB. CLIPSEN SKAL VÆRE HELT I BUND FØR BRUG)
- 5) SAMME PROCEDURE GENTAGES PÅ DE ØVRIGE

3 BEN SÅ DE INDSTILLES TIL SAMME HØJDE.
HVIS MAN ØNSKER AT SKRÅTSTILLE TOILETFORHØJEREN,
KAN DET GØRES VED, AT MAN STILLER DE BAGERSTE BEN
I EN POSITION HØJERE END DE FORRESTE.

STÆNKSKÆRMEN/SPANDE TRYKES I BUND I DEN INDVENDIGE
RAMME. DE TO HAK I STÆNKSKÆRMEN/SPANDE PASSER I MIDTEN AF
RAMMEN

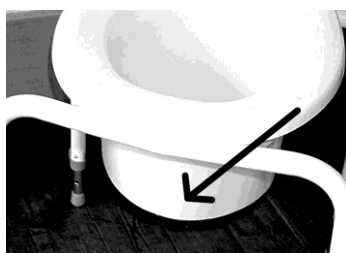

←JUSTERING AF STÆNKSKÆRM

Hvis stænkskærmen er for lang til toilettet,
kan man selv med en hobbykniv afkorte den,
så den passer til toilettet.

Artkl. Nr. 610010

Max. belastning 140 kg

NB! Clipsen skal skubbes i bund ved højdeindstilling

2 års reklamationsret mod fabrikationsfejl
(og rust reklamationsret).

Rengøring:

Produktet kan rengøres med almindelige
rengøringsmidler uden slibemiddel. Efter
rengøringen skal produktet skylles og aftørres.
Produktet kan tåle rengøring op til 85° C i 3 minutter.



21.01.13

Varenr.:	RESERVEDELE:
	FRITSTÅENDE TOILETFORHØJER MODEL FRIGG
310065	Clips til højdeindstilling, grå
310165	Clips til højdeindstilling, magentafarvet
610021	Stænkskærm
610022	Spand
610020	Toiletsæde, hvidt
610023	Rem (til at holde låg/sæde med)
610024	Små sorte dupsko (til remholderen)
310075	Sorte dupsko (til ender på armlæn)
312033	Teleskopbænk, løst ben med alt (ulakeret aluminium)
310017	Teleskopbænk, dupsko
310021	Teleskopbænk, kravebøsning

HMN a/s

Midtager 22, 2605 Brøndby, Danmark

Tlf.: +45 43 96 24 00 Fax: +45 43 96 26 92 E-mail: info@hmn.dk

www.hmn.dk