


## MONTERINGSANVISNING:HOFTE SÆDE TIL M2 BADE/TOILETSTOLE

Tilbehør: Sæde beregnet til brug hvis man har behov for en ekstra hældning af sædefunktionen bagerst

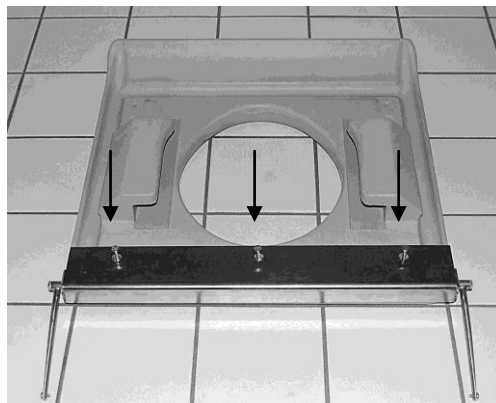


### 1). HØJDEINDSTILLINGSSTÆNGERNE FASTGØRES.

Inden metalbakken skrues fast til sædet skal de to højdeindstillingsstænger (en i hver side) skrues fast til metalbakken, med de medfølgende bolte og låse-møtrikker der placeres inden i bakken.


### 2). METALBAKKEN SKRUES PÅ SÆDET.

Et sæde lægges med bunden i vejret. Metalbakken sættes på ud mod bagenden af sædet. Den skrues fast ved hjælp af de 3 medfølgende træskruer. (Det indre i pu-skumsædet er en træplade. Det er deri fastgørelsen sker).

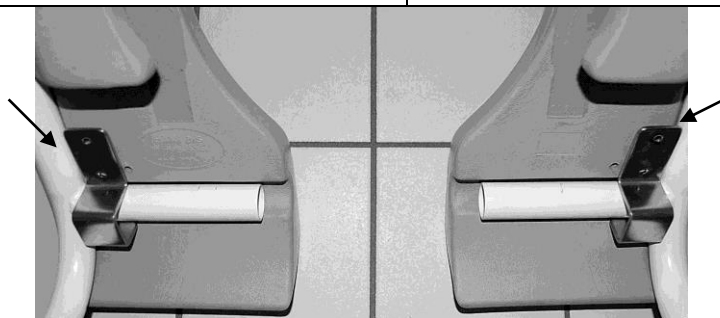

### 3). BESLAG TIL DE FORRESTE STÆNGER MONTERES.

Sædet lægges med bunden i vejret. Stolestellet placeres ovenpå. De to bøjler lægges på og skrues fast til sædet med de sidste 4 træskruer. Stolen vendes om er nu klar til færdigmontage.

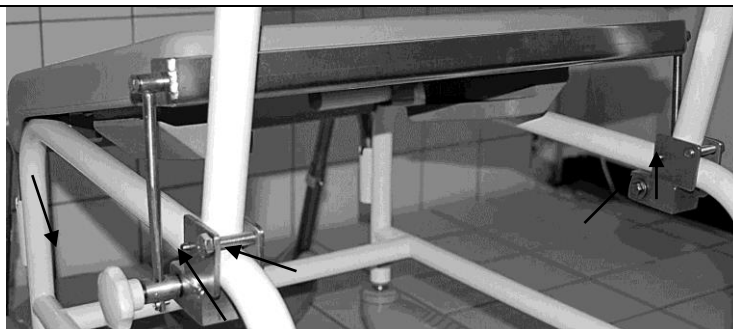

### 4). MONTERINGSSÆTTET FASTGØRES PÅ STOLEN

Pinolskruerne skrues fast op mod stellet. Fastgørelsesboltene skrues fast. Fingerskruerne skrues i. Kontraskruerne skrues fast i højdeindstillingsstængerne.


### ADVARSEL



UNDGÅ AT SIDDE PÅ DE  
YDERSTE 10 CM AF SÆDET, DA  
STOLEN KAN TIPPE FREMOVER



STÅ IKKE PÅ FODSTØTTERNE

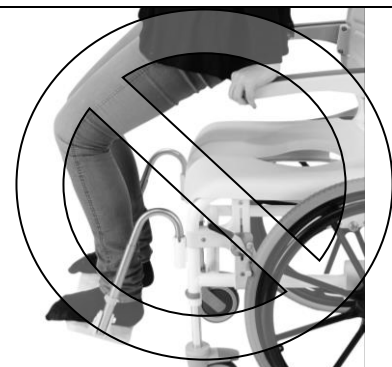

# BRUGSANVISNING: M2-BADE/TOILETSTOL MED HOFTESÆDE

Tilbehør: Sæde beregnet til brug hvis man har behov for en ekstra hældning af sædefunktionen bagerst.



**JUSTERING AF SÆDEHØJDEN BAGERST:  
DE TO FINGERSKRUE LØSNES. SÆDET HOLDES I DEN ØNSKEDE HØJDE  
OG FINGERSKRUE ER STRAMMES. I ØVERSTE POSITION ER DEN  
BAGERSTE DEL AF SÆDET LØFTET CA. 8 CM I FORHOLD TIL  
NORMALPOSITIONEN. DET SVARER TIL CA. 11°.  
NB! INDSTILLINGEN SKAL SKE UDEN BRUGER I STOLEN!**

Artkl. Nr. 310250/310251

**Max. belastning 125 kg**

2 års reklamationsret mod fabriktionsfejl  
(og rust reklamationsret).

Rengøring: Produktet kan rengøres med almindelige  
rengøringsmidler uden slibemiddel. Efter rengøringen skal  
produktet skylles og aftørres.

Produktet kan tåle rengøring op til 85° C i 3 minutter.



Produktet er CE-mærket hvilket betyder, at produktet  
overholder EU-lovgivningen og muliggør varens fri  
bevægelighed på det europæiske marked.

04.09.15

## Reserve dele

Varenummer	Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse
310341	Dæksel til std. sæde, grå	310252	Ryg (hvidt plastik netvæv) kun til artikel nr. 310027/310028 Stole indtil januar 2011
310343	Dæksel til intimsæde, grå	310282	Ryg (gråt plastik netvæv) kun til artikel nr. 310027/310028 Stole fra januar 2011
310065	Clips til højdeindstilling, grå	310063	Skruer til fastg. ryglæn 4 stk. (NB ikke til art. 310027/310028)
310165	Clips til højdeindstilling, magentafarvet	800244	Plastik dupsko til skubbehåndtag, grå
800181	PU skumpude til armlæn, lige armlæn 1 stk., grå	310066	Armlænsæt lige til "lige op" sæt med 2 stk.
800012	Skruer til fastgørelse af skumpuder. 2 stk.	310067	Armlænsæt lige m/PU til "lige op" sæt med 2 stk. Grå
310076	Nylonbøsning for armlæn	310064	100 mm hjul med påmonteret ben 1stk
800082	Bolt til armlæn	800042	100 mm hjul med ben til M2. Sæt med 4stk
800013	Nylonbøsning til ben	310073	Plastik dupsko til flade armlæn
310344	Pu ryg, grå	800244	Dupsko til runde armlæn og kørehåndtag, Grå
		800245	Dupsko til fladeovale armlæn, Grå

SKULLE DE I ØVRIGT HAVE SPØRGSMÅL ER DE MEGET VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS.

MED VENLIG HILSEN

HMN a/s

Midtager 22, 2605 Brøndby, Danmark

Tlf.: +45 43 96 24 00 Fax. +45 43 96 26 92 E-mail [info@hmn.dk](mailto:info@hmn.dk)

[www.hmn.dk](http://www.hmn.dk)