

BRUGSANVISNING

Neptun Super Soft 300 KG BADEBÆNK (MED TELESKOPBEN)

HØJDEN JUSTERES PÅ FØLGENDE MÅDE:



1. BADEBÆNKEN LÆGGES NED.
2. CLIPSEN TAGES UD SAMTIDIG MED, AT DER HOLDES I TELESKOPBENET.
3. TELESKOPBENET FLYTTES TIL DEN ØNSKEDE POSITION (UD AF 3 INDSTILLINGSMULIGHEDER).
4. CLIPSEN TRYKKES I BUND.

DET SAMME GENTAGES FOR DE ØVRIGE 3 BEN.

MONTERING AF RYG:

SÆDERNE TAGES AF.

RYGBØJLERNE PLACERES I RØRENE.

CLIPS MONTERES I BEGGE SIDER.

BEMÆRK AT RYGGEN HAR TO JUSTERINGSMULIGHEDER. SØRG FOR AT RYGGEN SIDDER I SAMME POSITION I BEGGE SIDER.

<p>Artkl. Nr. 300300 Max. belastning 300 kg NB! clipsen skal skubbes i bund ved højdeindstilling 2 års reklamationsret mod fabriktionsfejl (og rust reklamationsret).</p>		<p>Rengøring: Produktet kan rengøres med almindelige rengøringsmidler uden slibemiddel. Efter rengøringen skal produktet skylles og aftørres. Produktet kan tåle rengøring op til 85° C i 3 minutter.</p> <p>CE</p> <p>Produktet er CE-mærket hvilket betyder, at produktet overholder EU-lovgivningen og muliggør varens fri bevægelighed på det europæiske marked.</p> <p>04.09.2015</p>	
Reserve dele			
Varenummer	Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse
312030	Neptun plastsæde	800070	Malingspen mrk."Edding"
310065	Clips til højdeindstilling, grå	800298	Sort prop til teleskopbadebænk
310165	Clips til højdeindstilling, magentafarvet	310021	Kravebøsning
312033	Teleskopben (m/clips,dupsko,bøsning)1stk	310017	Dupsko til teleskopben

HMN a/s

Midtager 22, 2605 Brøndby, Danmark

Tlf.: +45 43 96 24 00 Fax. +45 4 www.hmn.dk 3 96 26 92 E-mail info@hmn.dk