



BRUGSANVISNING STØTTEGREB

PLACERING PÅ SENGEN

Støttegrebet placeres så der er under 6 cm eller over 25 cm i afstand fra enderne på støttegrebet til enderne på sengen.

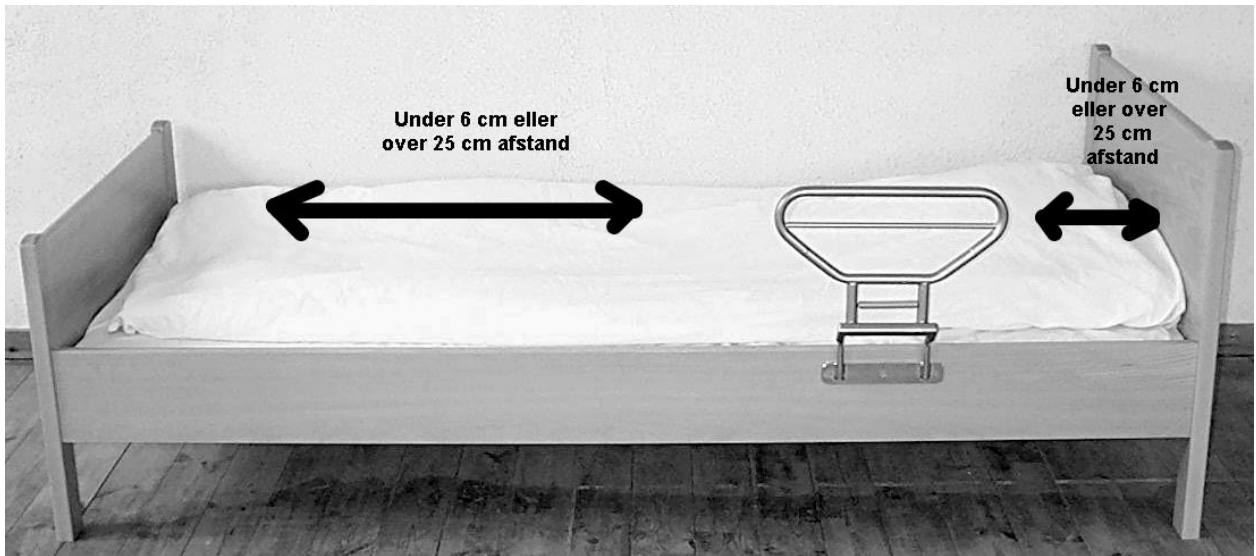

Støttegrebet skal placeres så toppen på det er minimum 22cm over den øverste kant på madrassen.

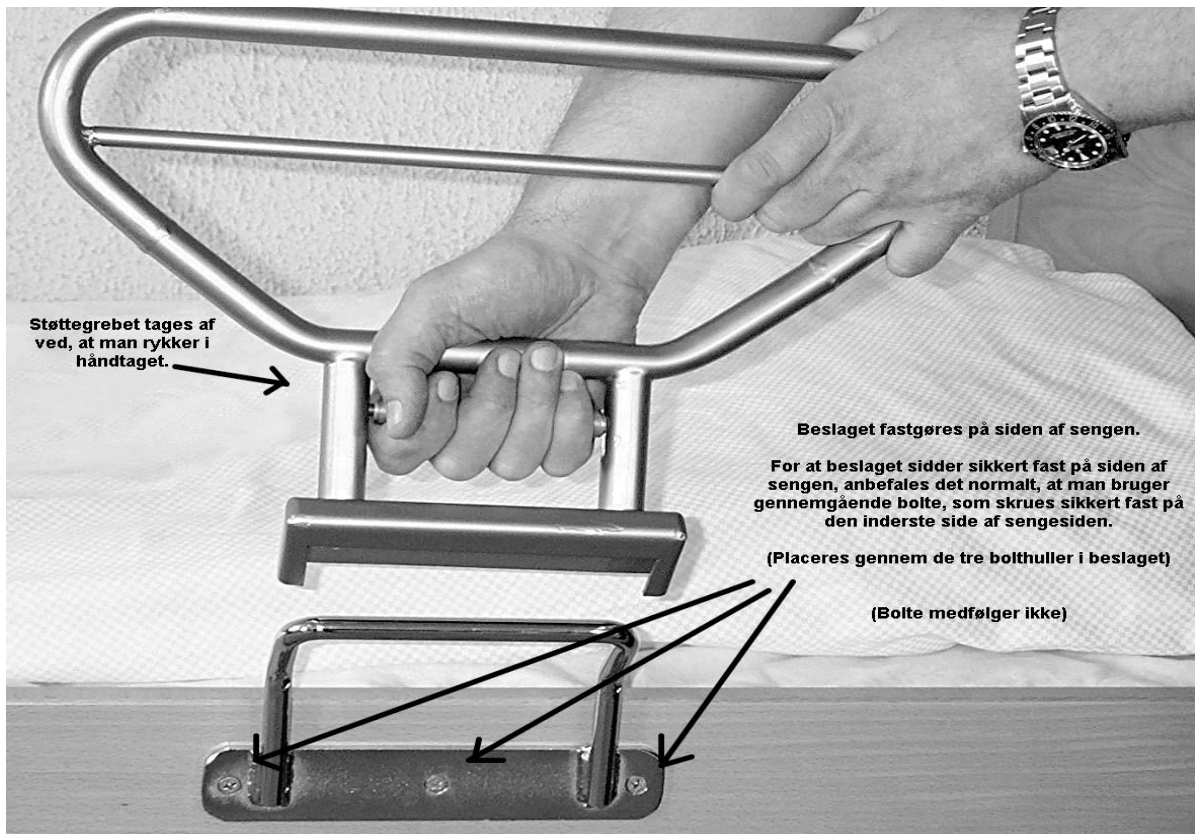

HMN a/s Midtager 22, 2605 Brøndby, Danmark

Tlf.: +45 43 96 24 00 Fax. +45 43 96 26 92 E-mail info@hmn.dk www.hmn.dk

Artkl. Nr. 221307

Max. belastning 120 kg

2 års reklamationsret mod fabriktionsfejl
(og rust reklamationsret).

Rengøring: Ved desinficering:

Kan benyttes; Ethanol og Propanoll opløsninger.

Ellers benyttes Alm. forekommende ikke-alkoholiske rengøringsmidler. Max.70 grader



Produktet er CE-mærket hvilket betyder, at produktet overholder EU-lovgivningen og muliggør varens fri bevægelighed på det europæiske marked.

04.09.15

Reserve dele til støttegreb

	Udløserhåndtag for støttegreb	Låsetappe
	Tappe for udløserhåndtag	Fjedre for låsetappe
	Gummi for udløserhåndtag	