

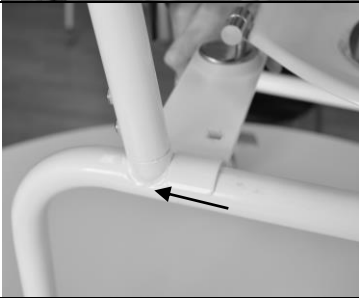





# Brugsanvisning for Toiletsæde til M2 Bade/Toiletstol

## Beregnet til brug ved toiletbesøg.

(1/2)

	<h3>Pakken indeholder</h3> <p>Ved modtagelse af toiletsædet, får man selve brættet monteret på beslaget, to beslag, to skruer, to bolte og et universal værktøj til at stramme boltene med.</p>
<h3>Toiletsædet</h3> <p>Start med at lægge toiletsæde beslaget på stolen, som der er vist på det øverste billede til højre. Beslaget for toiletsædet skal sættes helt op ad rygstykket, inden montering af skruer og bolte.</p>	 
<h3>Montering af venstre side</h3>	
 <h3>Beslag og skrue</h3> <p>Start med den ene side. Sæt skruen ned i hullet, så firkant passer med firkant. Derefter skal beslaget sættes på nedenunder, så det griber fat om stol stellet.</p>	 <h3>Bolt</h3> <p>Skrue derefter bolten fast om skruen. Bemærk inden du skruer, om toiletsæde beslaget, stadig er sat helt op ad rygstykket.</p>
	<p>Stram så bolten fast med universal værktøjet og boltene skal være helt stram.</p>
<p>Fortsættes på side 2</p>	

# Brugsanvisning for Toiletsæde til M2 Bade/Toiletstol

## Beregnet til brug ved toiletbesøg.

(2/2)

### Montering af højre side



#### Beslag og skrue

Så skal højre side monteres. Sæt skruen ned i hullet, så firkant passer med firkant. Derefter skal beslaget sættes på nedenunder, så det griber fat om stol stellet.



#### Bolt

Skru derefter bolten fast om skruen. Bemærk toiletsæde beslaget skal stadig være sat helt og ad rygstellet.

Derefter skal bolten strammes fast med universal værktøjet, så boltens sidder helt stramt.



**BEMÆRK!** Plast beslagene under sædet skal trykkes ned så sædet sidder fast og det ikke kan rykke frem. Man skal lige trykke sædet ned en ekstra gang.

#### Max. belastning 150 kg.

2 års reklamationsret mod fabriksfejl (og rust reklamationsret).

#### Beslag reklamationsret.

Vi yder 5 års reklamationsret imod stelbrud på toiletsædet. Reklamationsretten gælder ved fabriks- eller materialefejl og under forudsætning af normalt brug. Vi gør opmærksom på at almindelig slitage ikke er dækket under garantien.

#### Rengøring:

Produktet kan rengøres med almindelige rengøringsmidler uden slibemiddel. Efter rengøringen skal produktet skylles og aftørres.  
**Produktet kan tåle rengøring op til 85° C i 3 minutter.**

Produktet er CE-mærket hvilket betyder, at produktet overholder EU-lovgivningen og muliggør varens fri bevægelighed på det europæiske marked.



Artikel nr.:

330024

## HMN A/S

Midtager 22, 2605 Brøndby, Danmark  
Tlf. +45 43 96 24 00, Fax. +45 43 96 26 92  
E-mail: [info@hmn.dk](mailto:info@hmn.dk) Website: [www.hmn.dk](http://www.hmn.dk)