

BRUGSANVISNING

Neptun Super Soft 300 KG BADEBÆNK (MED TELESKOPBEN)

HØJDEN JUSTERES PÅ FØLGENDE MÅDE:



1. BADEBÆNKEN LÆGGES NED.
2. CLIPSEN TAGES UD SAMTIDIG MED, AT DER HOLDES I TELESKOPBENET.
3. TELESKOPBENET FLYTTES TIL DEN ØNSKEDE POSITION (UD AF 3 INDSTILLINGSMULIGHEDER).
4. CLIPSEN TRYKKES I BUND.

DET SAMME GENTAGES FOR DE ØVRIGE 3 BEN.

MONTERING AF RYG:

SÆDERNE TAGES AF.

RYGBØJLERNE PLACERES I RØRENE.

CLIPS MONTERES I BEGGE SIDER.

BEMÆRK AT RYGGEN HAR TO JUSTERINGSMULIGHEDER. SØRG FOR AT RYGGEN SIDDER I SAMME POSITION I BEGGE SIDER.

Artkl. Nr. 300300

Max. belastning 300 kg

**NB! clipsen skal skubbes i bund ved
højdeindstilling**

2 års reklamationsret mod fabriktionsfejl
(og rust reklamationsret).

Rengøring:

Produktet er fremstillet i rustfrie materialer og kan rengøres med almindelige rengøringsmidler uden slibende eller ætsende effekt.
Det frarådes at benytte opløsningsmidler eller klor.
Polyurethan tåles vask op til 80 grader C og kan rengøres med ethyl eller propyl alkohol med max. opløsning på 70 %. Produktet skylles og aftørres efter rengøring



18.01.13

Reserve dele

Varenummer	Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse
312030	Neptun plastsæde	800070	Malingspen mrk."Edding"
310065	Clips til højdeindstilling, grå	800298	Sort prop til teleskopbadebænk
310165	Clips til højdeindstilling, magentafarvet	310021	Kravebøsning
312033	Teleskopben (m/clips,dupsko,bøsning)1stk	310017	Dupsko til teleskopben

HMN a/s

Midtager 22, 2605 Brøndby, Danmark

Tlf.: +45 43 96 24 00 Fax. +45 4 www.hmn.dk 3 96 26 92 E-mail info@hmn.dk