

BRUGSANVISNING NEPTUN SUPER SOFT TELESKOPBADEBÆNKE

Bænk beregnet til at sidde på ved badning/afvaskning/brusning

Sædet monteres på følgende måde:



PU SÆDET KAN NEMT KLIKKES NED PÅ RØRENE


HØJDEN JUSTERES PÅ FØLGENDE MÅDE:

- 1) BADEBÆNKEN LIGGES NED PÅ SIDEN.
- 2) CLIPSEN TAGES UD
- 3) BENET FLYTTES TIL DEN ØNSKEDE HØJDE
- 4) CLIPSEN SÆTTES I IGEN (NB: CLIPSEN SKAL VÆRE HELT I BUND FØR BRUG)
- 5) SAMME PROCEDURE GENTAGES PÅ DE ØVRIGE 3 BEN.

NB! Ved skråtstilling: Max. 2 hullers forskel bagi og foran



MONTERING AF RYG:

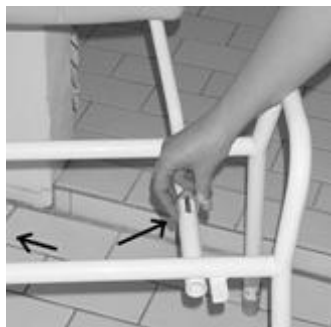

- 1) SÆDET KLIKKES AF.
- 2) RYGGEN SKUBBES IND I DE TO RYGSTÆNGER
- 3) RYGGEN PLACERES I DEN ØNSKEDE POSITION(DER ER 2 MULIGE INDSTILLINGER)
- 4) CLIPSENE SÆTTES I HULLERNE SOM VIST PÅ FOTOET. DER SKAL EN CLIPS I HVER AF DE TO RYGSTÆNGER. (NB! CLIPSENE SKAL VÆRE HELT I BUND FØR BRUG).
- 5) SÆDET KLIKKES PÅ IGEN.

Artkl. Nr. 312002/312003

Max. belastning 150 kg

NB! Clipsen skal skubbes i bund ved højdeindstilling

2 års reklamationsret mod fabriktionsfejl
(og rust reklamationsret).

Stelreklamationsret.

Vi yder 5 års reklamationsret imod stelbrud på M2-bade/toiletstole samt rustfri stål badebænke. Reklamationsretten gælder ved fabriktions- eller materialefejl og under forudsætning af normalt brug. Vi gør opmærksom på at almindelig slitage ikke er dækket under garantien.

Rengøring:

Produktet er fremstillet i rustfrie materialer og kan rengøres med almindelige rengøringsmidler uden slibende eller ætsende effekt. Det frarådes at benytte opløsningsmidler eller klor. Polyurethan tåles vask op til 80 grader C og kan rengøres med ethyl eller propyl alkohol med max. opløsning på 70 %. Produktet skylles og aftørres efter rengøring

17.01.13



| Varenr.: | RESERVEDELE: |
|----------|---|
| | NEPTUN TELESKOPBADEBÆNKE |
| 310065 | Clips til højdeindstilling(samme til ryg) |
| 310165 | Clips til højdeindstilling, gennemgående, magentafarvet |
| 800300 | PU sæde |
| 312033 | Teleskopben (1stk.med clips, dupsko, bøsning) |
| 310017 | Dupsko (til teleskopben) |
| 310021 | Bøsning til teleskopben |
| 800301 | PU del til ryg |

HMN a/s

Midtager 22, 2605 Brøndby, Danmark

Tlf.: +45 43 96 24 00 Fax: +45 43 96 26 92 E-mail info@hmn.dk

www.hmn.dk