

## Drejeligt badekarssæde



Badekarssæde som kan drejes med brugeren for at lette indstigningen i badekaret.  
**(Kan anvendes uden armlæn. De demonteres uden brug af værktøj)**

⇒ Omdrejningen af badekarssædet justeres ved hjælp af et håndtag, som låser sædet når det er i bund. Der er 4 faste indstillinger.



⇐ Badekarssædet gøres fast i badekaret ved at skrue på stængerne til de passer mod siderne på badekaret.  
M.h.t. størrelser af badekar som sædet passer til; Se venligst bagsiden af brochuren.



**HMN** since 1934

## Drejeligt badekarssæde

<b>Tekniske data:</b>			
Sædestr.(størrelsen på plastsædet)	B45xD40xH39 cm		
Total bredde	71 cm		
Passer til badekar med inderbredde	Ca. 52,5-60,5 cm (målt ca. 8 cm nede i badekaret fra overkanten!).		
Anlæg på badekarskant	Ca. 7 cm.		
Sædematerialer	Plast		
Vægt	8,1 kg		
Max. belastning	100 kg		
Rengøring	Alm. Forekommende rengøringsmidler ved max. 80 grader		
Stel	Stål. Pulverlakeret hvidt.		
Armlæn	Kan tages af.		
Omdrejning	4 faste indstillinger med 90 graders interval.		
<b>Beskrivelse:</b>	<b>Varenumre:</b>	<b>HMI nr:</b>	<b>ISO nr.:</b>
Drejeligt badekarssæde	610253	29583	09 33 03
			
7/7-2011			



**HMN** since 1934