


BRUGSANVISNING TIL DEJELIGT BADEKARSÆDE / **BRUKSANVISNING TILL VRIDBAAR BADKARSSITS**  
SÆDE BEREGNET TIL BRUG VED BADNING/BRUSNING / **SITS AVSEDD FÖR ANVÄNDNING VID BAD/DUSCH..**

DK/SE

BADEKARSÆDET / **BADKARSSITS:**

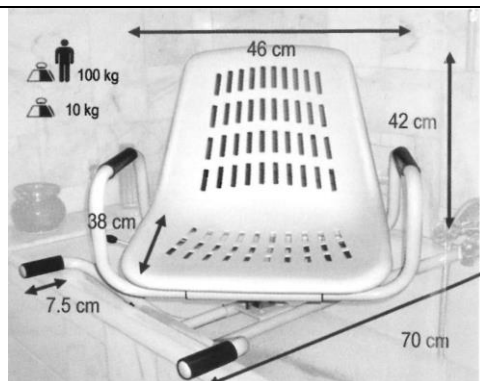



BADEKARSÆDET PASSER TIL BADEKAR MED  
INDERBREDDE PÅ CA. 52,5-60,5 CM

**BADKARSSITS PASSAR MED  
BAD INSIDE BREDD CA. 52,5-60,5 CM**

ARMLÆNENE KAN DEMONTERES UDEN BRUG AF VÆRKTØJ.

**ARMSTÖD KAN ISÄR UTAN ANVÄNDNING AV VERKTYG.**

OMDREJNING / **ROTATION:**

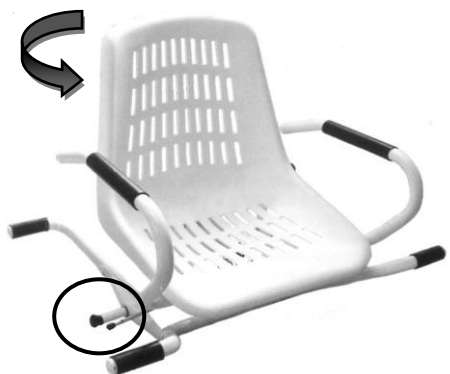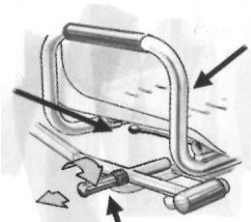

BADEKARSÆDET FASTGØRES I BADEKARET  
VED AT SKRUE PÅ STÆNGERNE TIL DE PASSER MOD  
SIDERNE AF BADEKARET.

**BADKARSSITS FASSTBE I BADEKARET MED SKRUV PÅ  
STOLPAR TILL PASSA MOT SIDORNA I BADEKARET.**

VED AT SKULLE JUSTERE BADEKARSÆDETS OMDREJNING,  
KAN DU VED HJÆP AF ET HÅNDTAG JUSTERE DET.  
HÅNDTAGET LÅSER BADEKARSÆDET, NÅR DET ER I BRUG.

**GENOM ATT JUSTERA BADKARSSITSEN, KAN DU TACK VARE  
FÖRHANDSGRANSKNINGEN ETT HÅNDTAG FÖR ATT  
JUSTERA DEN. SPAKEN LÅSER BADKARSSITSEN NÅR DEN  
ÄR I BRUK.**

BADEKARSÆDET HAR 4 FASTE INDSTILLINGER MED 90  
GRADERS INTERVAL.

**BADKARSSITSEN HAR FYRA FASTA INSTÄLLNINGAR MED 90  
GRADERS INTERVALL.**

Artikel. Nr. 610253

Reserve dele / **Reservedelar:**

800166

Låsearm til drejeligt badekarsæde / **Spärr vridbar bad sits**

**Max. belastning 100 kg**

2 års reklamationsret mod fabriktionsfejl (og rust reklamationsret).

**Reklamation:**

Reklamationsretten gælder ved fabriktions- eller materialefejl og under forudsætning af normalt brug.  
Vi gør opmærksom på at almindelig slitage ikke er dækket under garantien.

**Max. lasta 100 kg**

**2 års garanti mot tillverkningsfel (och rost garanti).**

**Garanti:**

**Garantin gäller för tillverknings- eller materialfel och förutsatt normal användning.**

**Observera att normalt slitage täcks inte av garantin.**

**Rengöring:**

Produktet er fremstillet i pulverlakeret stål og kan rengøres med almindelige rengøringsmidler uden slibende eller ætsende effekt.  
Det frarådes at benytte opløsningsmidler eller klor. Produktet skylles og aftørres efter rengøring

**Rengöring:**

**Produkten är tillverkad av pulverlackerat stål och kan rengöras med vanliga rengöringsmedel utan slip eller frätande.  
Det är olämpligt att använda lösningsmedel eller klor. Produkten sköljs och torkas efter rengöring**



17.03.15 Produced in the EU

HMN a/s  
Midtager 22, 2605 Brøndby, Danmark  
Tlf.: +45 43 96 24 00 Fax.: +45 43 96 26 92 E-mail  
[info@hmn.dk](mailto:info@hmn.dk) [www.hmn.dk](http://www.hmn.dk)